

# venize

## Gebrauchsanweisung zu Deiner Menstruationstasse

**WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.**

Anwendung: Die Menstruationstasse ist ein Hygieneartikel für Deine monatliche Blutung. Bevor Du die Menstruationstasse einsetzt, solltest Du Dir gründlich die Hände waschen und die Tasse mit Wasser befeuchten. Setze oder stelle Dich bequem hin (wir empfehlen die Hocke). Um die Menstruationstasse einzusetzen gibt es verschiedene Faltechniken. Wir empfehlen die C-Faltung - auch Herz-Faltung genannt. Hierfür drückst Du die Menstruationstasse zusammen und faltest sie dann noch einmal. Jetzt kannst Du die Tasse im gefalteten Zustand in die Scheide einführen. Achte darauf, sie nicht so tief einzuführen wie einen Tampon. Das Ende sollte am Scheideneingang noch tastbar sein. Spüre dann in Dich hinein, ob die Menstruationstasse angenehm sitzt. Hast Du sie richtig eingeführt, ist der kelchförmige Becher entfaltet und kaum noch spürbar. Die Menstruationsflüssigkeit wird dann komplett aufgefangen.

Die Menstruationstasse solltest Du idealerweise nach 8 Stunden entfernen und auswaschen. Wasche Dir hierfür gründlich die Hände. Führe Daumen und Zeigefinger in die Scheide ein und ertaste das Ende der Menstruationstasse, also den kleinen Stiel. Wichtig: Nicht an diesem Stiel ziehen! Denn es kann sich ein Unterdruck gebildet haben, der durch das Ziehen zu Verletzungen führen kann. Greife mit Zeigefinger und Daumen den unteren Teil der Menstruationstasse und drücke ihn leicht zusammen. So löst sich der Unterdruck und Du kannst die Menstruationstasse vorsichtig entfernen.

### Spezifikationen zu Artikelnummer 010854DI

Gewicht brutto (in g): 13; Gewicht netto (in g): 11

Material: medizinisches Silikon

Reinigungshinweis: Die Menstruationstasse wird mindestens zweimal täglich entnommen, geleert und mit Wasser ausgespült und im Anschluss wieder eingesetzt. Wenn Du gerade unterwegs bist und keine Möglichkeit zum Auspülen hast, kannst Du das Sekret auch in der Toilette entsorgen, die Menstruationstasse auswaschen und wieder einsetzen. Nach der Periode sollte die Menstruationstasse abgekocht und somit desinfiziert werden. Gebe dazu Wasser in einen Topf, bring es zum Kochen und gebe die Menstruationstasse hinein. Tipp: Das klappt besonders gut, wenn Du die Menstruationstasse ins Innere eines Schneebebens steckst. So berührt die Tasse nicht die kochend heißen Topfwände und bleibt sicher im Wasser. Belasse sie für ca. 20 Minuten im kochenden Wasser. Für eine hygienische Aufbewahrung zwischen den Monatsblutungen empfiehlt sich ein Stoffbeutelchen oder eine kleine Box mit Deckel.

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Unsere Kunden nutzen dafür die E-Mail Adresse [hallo@venize.de](mailto:hallo@venize.de).

### Warn- und Sicherheitshinweise:

Nicht für Kinder geeignet, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Benutze das Produkt ausschließlich so, wie in dieser Anleitung beschrieben, nicht zweckentfremden. Wende das Produkt nicht auf verletzter oder gereizter Haut an. Brich die Anwendung ab, wenn Hautirritationen oder sonstiges Unwohlsein/Schmerzen auftreten. Lagere das Produkt bei Zimmertemperatur, zwischen 0°- 40°C, sonst ist die Funktionalität des Produktes nicht länger gegeben. Sicherer und angenehmer Gebrauch immer mit wasserbasiertem Gleitmittel (wie z.B. Waterglide). Verwende keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material des Toys angegriffen werden. Nicht mit spitzen Gegenständen in das Produkt stechen, nicht ins Feuer werfen. Verwende das Produkt nicht, wenn es mechanische Beschädigungen oder Auffälligkeiten aufweist (Deformation, Risse im Material etc.)

Die Menstruationstasse ist vor oder nach jedem Gebrauch zu reinigen. Nach der Reinigung ist es sehr wichtig, das Material vollständig trocknen zu lassen, bevor das Produkt verstaut wird. Die Anwendung einer Menstruationstasse ist nicht zu empfehlen, wenn Du: eine Spirale trägst, eine Infektion oder Entzündung hast oder gerade entbunden hast. Unter diesen Umständen ist vor Verwendung einer Menstruationstasse unbedingt Rücksprache mit Deinem behandelnden Gynäkologen zu halten.

Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputtgehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte

# venize

nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel!

Die Waren werden bitte unter Bezugnahme auf die Garantie an die folgende Adresse gesendet:

B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen  
Terminal 2 Retourenannahme  
Fuggerstraße 17  
33689 Bielefeld

Mehr dazu findest Du unter <https://www.venize.de/365-tage-geld-zurueck-garantie>

Venize Trading GmbH  
Dortmunder Str. 34, 28199 Bremen  
E-Mail für unsere Kunden: [hallo@venize.de](mailto:hallo@venize.de)